

# Roll'n Go



**RollNGo**

**info@rollngo.nl**  
**[www.rollngo.nl](http://www.rollngo.nl)**

# Gebruikershandleiding model "trendy"

Wij willen u bedanken voor het kopen van het model "trendy".  
Het is belangrijk dat u eerst de handleiding leest voor gebruik.

## 1. Goedkeuring van de rollator

Deze rollator is EEC –goedgekeurd.

**93/42/EEC**

**MEDICAL DEVICE DIRECTIVE**


**SAFETY STANDARDS EN NORMS:**

**EN 1985:1998, EN ISO 14971:2009, EN ISO 10993-1:2009**

THIS DOCUMENT IS ONLY VALID FOR THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION DESCRIBED AND IN CONJUNCTION WITH THE TEST DATA DETAILED ABOVE. NEVERTHELESS THE MANUFACTURER IS NOT EXEMPTED TO PERFORM ALL THE NECESSARY ACTIVITIES BEFORE ISSUING THE DECLARATION OF CONFORMITY. IN CASE THE APPLIANCE IS MODIFIED OR THE APPLIANCE WILL BE EQUIPPED WITH ACCESSORIES NOT SPECIFIED IN THE MANUFACTURER OPERATOR MANUAL, IT IS RECOMMENDED TO GET IN TOUCH WITH ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE FOR EC VALIDITY EXTENSION.

DATE OF ISSUE MARCH 2012

## 2. Onderdelen van uw rollator

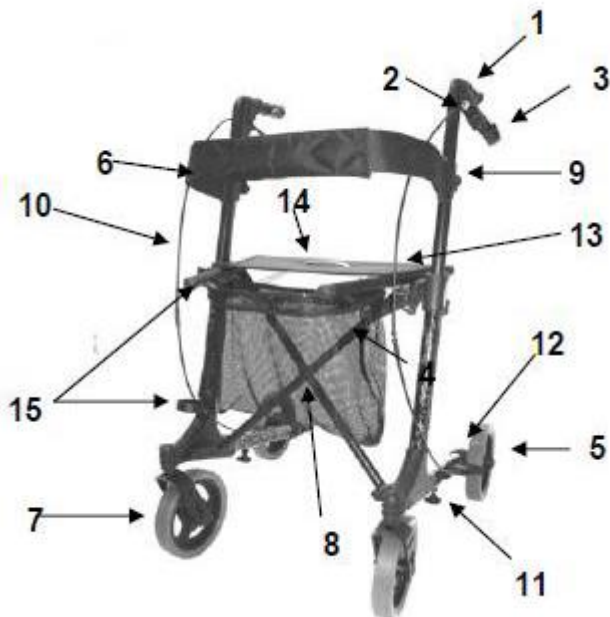

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Handvat           | 9. Rugleuning                          |
| 2. Kabel stelschroef | 10. Rem kabel                          |
| 3. Parkeer remmen    | 11. x                                  |
| 4. Frame             | 12. Knop om poten in te klappen        |
| 5. Achterwiel        | 13. Vouwbaar zitting                   |
| 6. Rugleuning        | 14. Handvat om de zitting op te vouwen |
| 7. Voorwiel          | 15. Krukkenhouder                      |
| 8. Boodschappentas   |  |

### 3. Gebruik van de rollator

Het maximum gebruikersgewicht voor deze rollator is 100 kg. De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. U kunt gaan zitten op de rollator en hij is voorzien van een boodschappentas. Zorg ervoor dat u de boodschappentas niet te zwaar laadt, dit kan ervoor zorgen dat de rollator voorover valt. Gebruik de rollator op solide en egaal wegdek.

*Het gebruik van de rollator voor andere doelen zoals bijvoorbeeld als sta-op hulpmiddel of voor het vervoeren van zware lasten wordt sterk afgeraden en is zeer gevaarlijk.*

Personen met verminderde loopafstand, met balans storingen of met andere storingen die een normale staande en lopende houding niet toestaan, kunnen met behulp van deze rollator de persoonlijke loopafstand aanzienlijk verhogen of tenminste de mobiliteit verbeteren.

### 4. Installatie



Duw het achterwiel frame in het frame van de rollator totdat de pin zich in de juiste positie heeft vastgeklikt. Zodra het achterwiel frame in de juiste positie is dient u de schroef goed vast te draaien.



Schuif de handvatsteunen in de juiste positie zodat ze op de juiste hoogte zijn, doe hetzelfde met de framepoten. U dient de fixatieknoppen goed vast te draaien.

## 5. Uitvouwen van de rollator



Locked



Unlocked

Plaats de rollator op alle 4 de wielen en druk de zitting omlaag totdat u een klik hoort, die bevestigt dat de rollator is uitgeklappt.

## 6. Remmen



Om de snelheid uit de rollator te halen dient u beide remmen tegelijkertijd omhoog richting de duwhandvatten te bewegen (zie foto 1). Zorg ervoor dat u altijd rustig en geleidelijk remt.

Om de rollator op de parkeerrem te zetten dient u de remmen naar beneden te duwen totdat u hoort dat deze vastklikken (zie foto 2). Om de rollator van de parkeerrem af te halen dient u de remmen weer omhoog richting de duwhandvatten te bewegen.

**Waarschuwing; het effect van de remmen kan worden beïnvloed door de staat van de banden en de remkabel, check daarom regelmatig uw remmen.**

## 7. Remkabel stellen



Voor de gewenste remkracht kunt u de rem aanpassen ofwel handmatig met de schroef bij de huizing van de rem (1) of met het geschikte gereedschap (niet bijgevoegd) bij de remkabel (2) of direct bij de rem(3).

## 8. Opvouwen/transport/opbergen van uw rollator



Om de rollator op te vouwen dient u het handvat op de zitting omhoog te trekken.

## 9. Veiligheid en de rollator

- Gebruik de rollator alleen als loophulpmiddel.
- Gebruik de rollator alleen op solide en gelijkmatige ondergronden.
- Zorg bij het gebruiken van de rollator op hellende oppervlakte altijd dat u de remmen gebruikt. Op hellende oppervlakten kan de rollator sneller naar beneden rijden dan de loopsnelheid op dat moment. U kunt dan vallen.
- Hel de rollator nooit over naar de zijkant. De rollator kan dan omvallen. De maximale kantelhoek is 5 graden.
- Oefen nooit te zware druk op de handvatten aan de achterkant uit. De rollator kan naar achteren kantelen.
- Let bij het samenklappen van de rollator altijd op kledingstukken of lichaamsdelen die bekneld kunnen raken.
- Gebruik de boodschappentas alleen voor boodschappen en zorg ervoor dat de boodschappentas niet zwaarder is dan max.5 kg.
- Het wordt sterk afgeraden tassen of andere voorwerpen aan de duwhandvatten aan de achterkant van de rollator te hangen. De rollator kan dan kantelen.

## 10. Reiniging

Gebruik voor reiniging een gebruikelijk schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, maar maak de rollator regelmatig schoon.

## 11. Technische informatie

LxBxH 670x585x885/1060mm

Totaal gewicht (inclusief boodschappentas) 8.6 kg

Maximum gebruikers gewicht 100 kg

Maximum laadgewicht boodschappen tas 5 kg

Gebruikte materialen aluminium (6061T6,dikte 2,0mm) frame, nylon zitting en plastic componenten.

## 12. Garantie bepalingen

Op de door ons verkochte producten geldt standaard 12 maanden fabrieksgarantie, tenzij hieronder anders aangegeven. De garantie geldt niet voor normaal slijtende onderdelen en is niet overdraagbaar op een nieuwe eigenaar. De garantie vervalt wanneer:

- Er sprake is van een defect door onzorgvuldig gebruik
- Er sprake is van onjuist gebruik
- Er sprake is van te hoge belasting (overgewicht gebruiker)
- Er sprake is van vandalisme of diefstal



**RollGo**

**info@rollngo.nl**

**[www.rollngo.nl](http://www.rollngo.nl)**